

Klinion wondbehandeling

Voor een juiste keuze van de wondbedekker is de mate van afgifte van wondvocht, de kleurclassificatie (zwart-geel-rood) en de diepte en vorm van de wond van belang. Behandel de wond van zwart naar geel en van geel naar rood en gebruik daarvoor de specifieke producten. Bescherm de wond tegen bacteriële contaminatie, temperatuurdaling (bij verbandwisselingen) en uitdroging. Behandel de wond bij voorkeur met producten die een vochtig wondmilieu in stand houden. Onderstaand treft u een aantal belangrijke richtlijnen aan.

Algemene tips

- Voorkom maceratie van wondranden, gebruik:**
- Kliniderm Alginate Extra (zeer hoge absorptie)
 - Kliniderm Fiber (verticale absorptie)
 - Mesitran honingzalf (bevat zinkoxide)

Reinig bij iedere verbandwissel actief de wond met Prontosan wondspoelvoelstof of -gel.

- Diepe wonden altijd opvullen met:**
- Kliniderm Alginate Cavity of Kliniderm Fiber Rope (tamponstreng) bij vochtige/natte wonden.
 - Mesitran Soft (actieve antibacteriële honinggel) bij droge wonden.

- Bij sterk riekende wonden:**
- Antibacteriële honingzalf/-gel (Mesitran)
 - Geurneutraliserend koolstofverband (Lyfoam C)

- Bij geïnfecteerde wonden:**
- Antibacteriële honingzalf/-gel (Mesitran)

Secundair verband:
Gebruik een secundair verband bij de toepassing van een algiinaat, fiberverband, vetgaas of wondzalf/-gel. Keuze uit: gaaskompres (HG Compres), nonwoven kompres (NW Compres), absorberend verband (Novopad of Exsupad).

- Fixatiemateriaal:**
- Hechtpleister (Kliniplast NW/Silk/Textile/Transparent)
 - Hechtpleister extra huidvriendelijk (Kliniplast Xtrata NW/Transparent)
 - Brede, geperforeerde fixatiepleister (Kliniplast EasyFix)
 - Brede, folie fixatiepleister (Kliniderm Film Xtrata op rol)
 - Fixatiewindsel (Klinifix Hydrolast, Klinifix Cohesive)
 - Netverband (Bandafix)
 - Buisverband (Tubifast)

Toelichting protocol

Analyseer de wond met behulp van een anamnese-evaluatieformulier: (o.a. kleurclassificatie en vochtaspect). Maak foto's bij elke verbandwisseling om het genezingsproces optimaal te kunnen volgen. Gebruik hiervoor de handige Klinion wondmeetkaartjes of -stickers.

- Voordelen van een vochtig wondmilieu:**
- Snelle verspreiding van nieuwe huidcellen
 - Bescherming van granulatieweefsel
 - Snellere en mooiere genezing
 - Verband is gemakkelijk en zonder beschadigingen van de huid te verwijderen
 - Pijnverlichting
 - Oplossing van geel fibrinebeslag
 - Verweking van necrose

Voordelen van (semi-) occlusieve wondverbanden (hydrocolloïd en hydro-actieve wondverbanden, schuimverbanden en wondfolies):


- Creëren/handhaven van een vochtig wondmilieu
- Geven minder kans op infecties
- Beschermen tegen verdamping/uitdroging

Note: Een foamverband is hetzelfde als een schuimverband.

- Voordelen van wondzalf/-gel op honingbasis:**
- Werkt antibacterieel en schimmeldodend
 - Snelle wondreiniging en genezing
 - Vele essentiële functies in één product
 - Breed toepasbaar zonder bijwerkingen
 - Te combineren met alle wondverbanden (wondzalf altijd DUN aanbrengen op het wondverband, wondgel kan in grotere hoeveelheid worden aangebracht)

Zorg dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen van de wondzorg!

Beslisboom wondverzorging

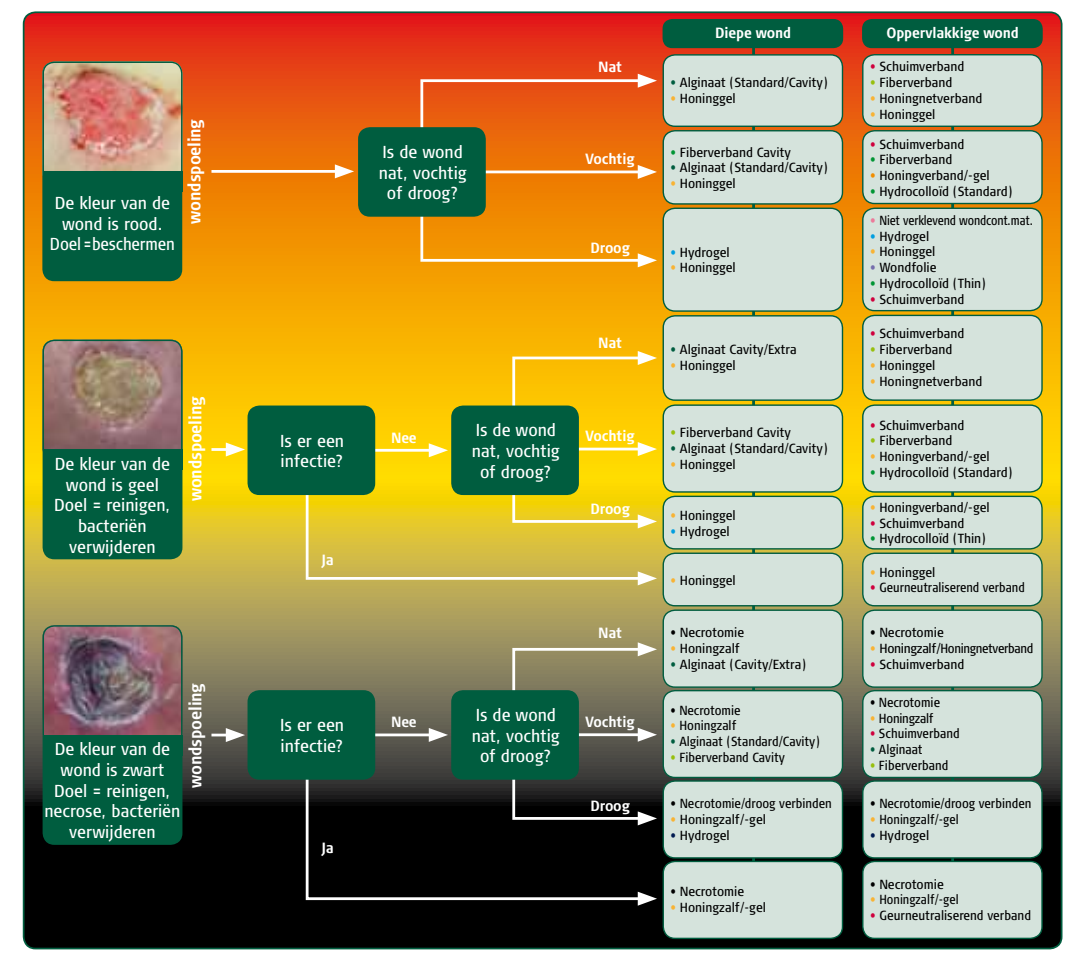

Producteigenschappen

- Hydrocolloïd (1-5 dagen)** Een wondverband, dat in aanraking met vocht, een gel vormt. Uitvoeringen in standaard (Standard), met plakrand (Border) en dunne versie (Thin).
- Honingverband (1-5 dagen)** Een honinggel wondverband, aan de bovenzijde voorzien van een beschermende wondfolie. Borderversie heeft rondom fixatie. Werkt antibacterieel, ontstekingsremmend, pijnreducerend en optimaliseert de wondgenezing. Transparant. Hecht niet aan de wond. Voor oppervlakkige wonden die weinig vocht afgeven in alle wondfasen.
- Honingnetverband (1-5 dagen)** Een synthetisch netverband voorzien van een honinggel. Werkt antibacterieel, ontstekingsremmend, pijnreducerend en optimaliseert de wondgenezing. Voor oppervlakkige wonden die veel vocht afgeven in alle wondfasen. Hecht niet aan de wond. Afdekken met secundair verband voor extra vochtopname.
- Geurneutraliserend verband (1 x daags)** Een verband dat koolstof bevat en de geur neutraliseert.
- Niet verklevend wondcont.mat. (1 à 2 x daags)** Gazen die meestal bestaan uit een katoenen/viscose vezel, geïmpregneerd met een vet, veelal paraffine of vaseline. Indien gecombineerd met honinggel, hecht het vetgaas niet aan de wond. Voor langdurig gebruik op de wond; combineren met Mesitran wondgel (Soft).
- Algiinaat (1-3 dagen)** Een nonwoven wondverband van calcium-natriumvezels. Vormt na aanraking met wondvocht een vormvaste gel. Heeft een groot absorberend en reinigend vermogen. Algiinaat Extra-versie bij veel wondvocht.

- Fiberverband (1-3 dagen)** Een zacht, sterk absorberend vormbaar en gelvormend wondverband. Dankzij het sterke verticale absorptievermogen wordt het wondvocht in het verband opgenomen en maceratie voorkomen.
- Honingzalf (1-3 dagen)** Een wondzalf voor het bestrijden van bacteriën en schimmels. Reduceert de ontstekingsreactie, zwelling en pijn. Reinigt de wond, lost necrose op en neutraliseert de geur. Gaat maceratie tegen. Reduceert de vochtgiftige. Optimaliseert de wondgenezing. Dun aanbrengen op het wondverband.
- Te combineren met alle wondverbanden.**
- Honinggel (1-3 dagen)** Een hydrogel bestaand uit polyethyleenglucol en honing. Eigenschappen zijn antibacteriële wondzalf. Voor alle wondfasen (zwart-geel-rood). Tevens toe te passen ter opvulling van diepe wonden.
- Schuimverband (1-3 dagen)** Een semi-permeabel verband dat bestaat uit een foam (schuim) van meestal polyurethaan. Heeft een groot absorptievermogen.
- Wondfolie (1-5 dagen)** Dunne semi-permeabele polyurethaanfolie, toe te passen op wonden die weinig of geen vocht afgeven. Kliniderm Film Xtrata voor de (zeer) gevoelige huid. Tevens als waterdichte fixatiefolie te gebruiken.
- Hydrogel (1-3 dagen)** Steriele heldere wondgel, voorziet in bevochtiging van de wond en versnelt het natuurlijke proces van autolytisch debridement (zelf-reiniging). Werkt verkoelend en pijnverminderend.

PRODUCTOVERZICHT KLINION WONDVERZORGING



| Bestelnr. | Uitvoering | Afmeting/inhoud | Inhoud verpakking | ZI-memocode | ZI-nummer | Health Base |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| Kompressen | | | | | | |
| NW Compres 4L Steriel | | | | | | |
| 175 001 | | 5 x 5 cm | 100 x 1 st | NONWK5 | 13755234 | NWKOM 55 |
| 175 030 | | 10 x 10 cm | 100 x 1 st | NONWK1 | 13755277 | NWKOM S10 |
| 175 040 | | 10 x 20 cm | 50 x 1 st | NONWK1 | 13755315 | NWKOM S20 |
| NW Splitcompres 4L Steriel | | | | | | |
| 175 051 | | 10 x 10 cm | 50 x 2 st | NONWK1 | 13755358 | SPILT S20 |
| NW Compres Extra 8L Niet steriel | | | | | | |
| 175 104 | | 5 x 5 cm | 100 st | NONWK5 | 14029766 | NWKOM 5 |
| 175 134 | | 10 x 10 cm | 100 st | NONWK1 | 14029804 | NWKOM 10 |
| NW Compres Extra 8L Steriel | | | | | | |
| 175 101 | | 5 x 5 cm | 100 st | NONWK5 | 13822705 | NWKOM 55 |
| 175 130 | | 10 x 10 cm | 100 st | NONWK1 | 13822721 | NWKOM S10 |
| 175 140 | | 10 x 20 cm | 50 st | NONWK1 | 13822748 | NWKOM S20 |
| Kliniulle - Geïmpregneerd zalfkompres Steriel | | | | | | |
| 170 098 | | 10 x 10 cm | 10 x 1 st | ZALFK1 | 14264617 | ZALFK S10 |
| 170 099 | | 10 x 30 cm | 20 x 1 st | ZALFK1 | 14990326 | ZALFK S30 |
| Novopad - Licht absorberend wondverband Steriel | | | | | | |
| 175 060 | | 5 x 5 cm | 100 x 1 st | NOVOK5 | 13755153 | NOVOP 55 |
| 175 061 | | 10 x 10 cm | 100 x 1 st | NOVOK1 | 13755161 | NOVOP S10 |
| 175 062 | | 10 x 20 cm | 50 x 1 st | NOVOK1 | 14015455 | NOVOP S20 |
| Exsupad - Zwaar absorberend wondverband Steriel | | | | | | |
| 170 000 | | 9 x 12 cm | 50 x 1 st | EXSUV9 | 14990784 | EXSUP S12 |
| 170 002 | | 10 x 20 cm | 35 x 1 st | EXSUV1 | 13574973 | EXSUP S20 |
| 170 003 | | 20 x 20 cm | 15 x 1 st | EXSUV2 | 13574981 | EXSUP S20 |
| 170 004 | | 20 x 30 cm | 10 x 1 st | EXSUV2 | 13575023 | EXSUP S20 |
| Kliniplast Border - Eilandpleister Steriel | | | | | | |
| 294 200 | | 5 x 7 cm | 50 x 1 st | EILAP5 | 14073102 | EILAN 7 |
| 294 201 | | 8 x 10 cm | 50 x 1 st | EILAP8 | 14073110 | EILAN 10 |
| 294 203 | | 8 x 15 cm | 50 x 1 st | EILAP8 | 14073129 | EILAN 15 |
| 294 204 | | 10 x 20 cm | 10 x 1 st | EILAP1 | 14073153 | EILAN 20 |
| 294 205 | | 10 x 25 cm | 10 x 1 st | EILAP1 | 14073145 | EILAN 25 |
| Kliniplast Film Plus - Transparante film met wondkussen Steriel | | | | | | |
| 174 410 | | 5 x 7,2 cm | 50 x 1 st | KLINF5 | 15410854 | KLINI 7.2 |
| 174 412 | | 10 x 10 cm | 50 x 1 st | KLINF1 | 15410870 | KLINI 10 |
| 174 414 | | 15 x 15 cm | 20 x 1 st | KLINF1 | 15410889 | KLINI 15 |
| 174 415 | | 10 x 20 cm | 20 x 1 st | KLINF1 | 15410897 | KLINI 20 |
| Engels Pluksel | | | | | | |
| 170 060 | | 5 m x 10 cm | 1 st | ENGEX1 | 13619462 | ENGEL 10 |
| Compressie | | | | | | |
| Klinion Startset A.C.T. (voor 2 benen) | | | | | | |
| 132 032 | | | 1 st | COMPX | 14222051 | COMPR 032 |
| Klinidur Textelast - Korterek zwachtel | | | | | | |
| 132 628 | | 5 m x 8 cm | 2 st | TEXTW5 | 14327821 | TEXTE 8 |
| 132 630 | | 5 m x 10 cm | 2 st | TEXTW5 | 13755412 | TEXTE 10 |
| Klinidur Forte - Langerek zwachtel | | | | | | |
| 132 362 | | 5 m x 10 cm | 1 st | KLINW7 | 13574531 | KLINI 10 |
| Klinisoft 5Y - Synthetische watten (polstermateriaal) | | | | | | |
| 141 091 | | 3 m x 10 cm | 1 st | SYNTW3 | 13651528 | SYNTH 10 |
| KPC Foot Cream | | | | | | |
| 3850 | | 150 ml | 1 st | VOETC | 15294536 | VOET CRE |
| Fixatie | | | | | | |
| Kliniplast - Hechtpleisters op rol | | | | | | |
| 294 176 | Nonwoven | 5 m x 2,5 cm | 12 st | HECHP5 | 14954699 | HECHT 2.5 |
| 294 161 | Textiel | 5 m x 2,5 cm | 12 st | HECHP5 | 14254719 | HECHT 2.5 |
| 294 181 | Silk | 5 m x 2,5 cm | 12 st | HECHP5 | 14254794 | HECHT 2.5 |
| 294 191 | Transparant | 5 m x 2,5 cm | 12 st | HECHP5 | 14954745 | HECHT 2.5 |
| 293 262 | Xtrata Nonwoven | 7 m x 2,5 cm | 12 st | HECHP7 | 15102645 | HECHT 25 |
| 293 522 | Xtrata Transparant | 7 m x 2,5 cm | 12 st | HECHP7 | 15102696 | HECHT 25 |
| Klinifix Hydrolast - Elastisch fixatiewindsel | | | | | | |
| 132 227 | | 4 m x 4 cm | 20 st | HYDRW4 | 13574361 | HYDRO 4 |
| 132 228 | | 4 m x 6 cm | 20 st | HYDRW4 | 13574388 | HYDRO 6 |
| 132 229 | | 4 m x 8 cm | 20 st | HYDRW4 | 13574396 | HYDRO 8 |
| 132 230 | | 4 m x 10 cm | 20 st | HYDRW4 | 13574418 | HYDRO 10 |
| Klinifix Cohesive - Cohesief elastisch fixatiewindsel | | | | | | |
| 132 378 | | 4 m x 4 cm | 5 st | COHEW4 | 13981013 | COHES 4 |
| 132 379 | | 4 m x 6 cm | 5 st | COHEW4 | 13574566 | COHES 6 |
| 132 380 | | 4 m x 8 cm | 5 st | COHEW4 | 13574574 | COHES 8 |
| 132 381 | | 4 m x 10 cm | 5 st | COHEW4 | 13574582 | COHES 10 |

| Bestelnr. | Uitvoering | Afmeting/inhoud | Inhoud verpakking | ZI-memocode | ZI-nummer | Health Base |
|---|---|-----------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| Vervolg Fixatie | | | | | | |
| Kliniplast EasyFix - Nonwoven fixatiepleister op rol | | | | | | |
| 294 360 | | 5 m x 5 cm | 1 st | FIXAP5 | 15233979 | FIXAT 5 |
| 294 361 | | 5 m x 10 cm | 1 st | FIXAP5 | 15233987 | FIXAT 10 |
| 294 362 | | 5 m x 15 cm | 1 st | FIXAP5 | 15233995 | FIXAT 15 |
| 294 363 | | 5 m x 20 cm | 1 st | FIXAP5 | 15234002 | FIXAT 20 |
| Wondreiniging | | | | | | |
| Prontosan | | | | | | |
| 9050 030 | Gel | 30 ml | 1 st | PRONC | 15290883 | PRONT GEL |
| 9050 350 | Oplossing | 350 ml | 1 st | PRONV | 15280845 | PRONT OPL |
| Hydrogel | | | | | | |
| Prontosan | | | | | | |
| 9050 030 | Gel | 30 ml | 1 st | PRONC | 15290883 | PRONT GEL |
| Honingszalf/-gel | | | | | | |
| Mesitran | | | | | | |
| 174 701 | Zalf | 20 gram | 1 st | MESIZ | 14799391 | MESIT 220 |
| 174 705 | Soft (gel) | 15 gram | 1 st | MESIC | 15048810 | MESIT 705 |
| 174 706 | Soft (gel) | 50 gram | 1 st | MESIC | 15420094 | MESIT 706 |
| Honingsverband | | | | | | |
| Mesitran wondverband | | | | | | |
| 174 710 | Hydro | 10 x 10 cm | 5 x 1 st | MESIV1 | 14924374 | MESIT 10 |
| 174 711 | Border | 10 x 10 cm | 5 x 1 st | MESIV1 | 14924390 | MESIT 10 |
| 174 712 | Net | 10 x 10 cm | 5 x 1 st | MESIV1 | 14924498 | MESIT 10 |
| Schuim/-foamverband | | | | | | |
| Kliniderm foamverband | | | | | | |
| 174 810 | Foam | 5x5 cm | 10 (10 x 1) | FOAMV5 | 15546926 | FOAMV5 |
| 174 811 | Foam | 10x10cm | 10 (10 x 1) | FOAMV1 | 15546934 | FOAMV10 |
| 174 812 | Foam | 15 x 15 cm | 10 (10 x 1) | FOAMV8 | 15546950 | FOAMV15 |
| 174 813 | Foam | 10 x 18 cm | 10 (10 x 1) | FOAMV7 | 15546942 | FOAMV10 |
| 174 814 | Foam | 20 x 20 cm | 10 (10 x 1) | FOAMV9 | 15546969 | FOAMV20 |
| 174 815 | Border (wondkussen 4 x 4 cm) | 7.5 x 7.5 cm | 10 (10 x 1) | FOAMV1 | 15546977 | FOAMV7 |
| 174 816 | Border (wondkussen 5 x 5 cm) | 10 x 10 cm | 10 (10 x 1) | FOAMV1 | 15546985 | FOAMV10 |
| 174 817 | Border (wondkussen 10 x 10 cm) | 15 x 15 cm | 10 (10 x 1) | FOAMV1 | 15546993 | FOAMV15 |
| 174 820 | Heel | Heel | 5 (5 x 1) | FOAMV1 | 15547000 | FOAMV HEE |
| 9053 087 | Lyofoam Sacraal | 22 x 22 cm | 10 x 1 st | LYOFP2 | 15307093 | LYOFO 22 |
| 9053 085 | Lyofoam C Koolstof (geurneutraliserend) | 10 x 10 cm | 10 x 1 st | LYOFX1 | 14764598 | LYOFO 10 |
| Hydrocolloid | | | | | | |
| Kliniderm Hydro | | | | | | |
| 174 102 | Thin | 10 x 10 cm | 5 x 1 st | KLINX1 | 14632306 | KLINI 10 |
| 174 103 | Thin | 15 x 15 cm | 5 x 1 st | KLINX1 | 14632322 | KLINI 15 |
| 174 302 | Standard | 10 x 10 cm | 5 x 1 st | KLINX1 | 14632373 | KLINI 10 |
| 174 303 | Standard | 15 x 15 cm | 5 x 1 st | KLINX1 | 14632403 | KLINI 15 |
| 174 202 | Border | 10 x 10 cm | 5 x 1 st | KLINV1 | 14632187 | KLINI 10 |
| 174 203 | Border | 14 x 14 cm | 5 x 1 st | KLINV1 | 14632195 | KLINI 14 |
| 174 204 | Sacraal | 15 x 18 cm | 5 x 1 st | KLINV1 | 14642816 | KLINI 18 |
| Wondfolie | | | | | | |
| Kliniderm Film - Transparante wondfolie | | | | | | |
| 174 402 | | 6 x 7 cm | 10 x 1 st | KLINF6 | 14632071 | KLINI 57 |
| 174 403 | | 10 x 12 cm | 10 x 1 st | KLINF1 | 14632098 | KLINI S12 |
| 174 404 | | 15 x 20 cm | 10 x 1 st | KLINF1 | 14632101 | KLINI S20 |
| 174 405 | | 15 x 30 cm | 10 x 1 st | KLINF3 | 14997568 | KLINI S30 |
| Xtrata - Extra huidvriendelijke wondfolie | | | | | | |
| 291 413 | Steriel | 10 x 13,5 cm | 50 st | KLINF1 | 15102750 | KLINI 135 |
| 291 410 | Onsteriel | 10 cm x 10 m | 1 st | KLINF1 | 15102726 | KLINI 10 |
| 291 415 | Onsteriel | 15 cm x 10 m | 1 st | KLINF1 | 15102734 | KLINI 15 |
| Alginaat | | | | | | |
| Kliniderm Alginate | | | | | | |
| 174 502 | Standaard | 10 x 10 cm | 10 x 1 st | KLINV1 | 14632519 | KLINI 10 |
| 174 503 | Standaard | 10 x 20 cm | 5 x 1 st | KLINV1 | 14632527 | KLINI 20 |
| 174 510 | Extra | 10 x 10 cm | 10 x 1 st | KLINV3 | 14632535 | KLINI 10 |
| 174 515 | Cavity | 30 cm | 5 x 1 st | KLINV3 | 14632462 | KLINI S15 |
| Fiberverband | | | | | | |
| Kliniderm Fiber | | | | | | |
| 174 520 | Standaard | 5 x 5 cm | 10 x 1 st | KLINV5 | 15428214 | KLINI 55 |
| 174 521 | Standaard | 10 x 10 cm | 10 x 1 st | KLINV1 | 15428222 | KLINI S10 |
| 174 522 | Standaard | 15 x 15 cm | 5 x 1 st | KLINV1 | 15428230 | KLINI S15 |
| 174 530 | Rope | 42 x 2 cm | 5 x 1 st | KLINV4 | 15428249 | KLINI S20 |
| Verbandwisseling | | | | | | |
| 102 157 | Verbandwisselset chron. wonden | | | VERBX | 15020118 | VERBA 157 |

