


# BESLISBOOM WONDBEHANDELING

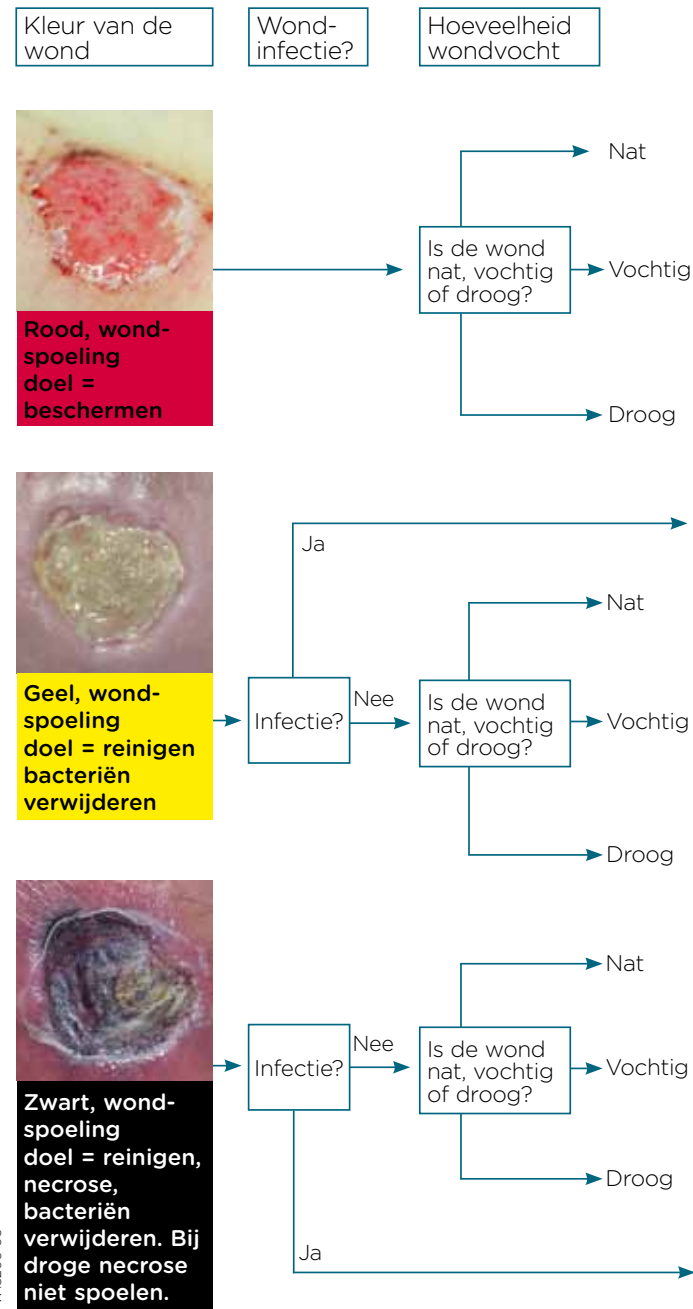

Diepe wond	Oppervlakkige wond
Seasorb Soft Mesitran Soft	Biatain, -Silicone, Kliniderm Fiber, Mesitran Soft, -Net
Kliniderm Fiber Seasorb Soft Mesitran Soft	Biatain, -Silicone, -IBU, Kliniderm Fiber, Mesitran Hydro, -Tulle, -Soft, Comfeel Plus Ulcus, -Plus Transparant
Purilon Mesitran Soft	Purilon, Mesitran Soft, -Tulle Kliniderm Film, -Xtrata, Comfeel Plus Ulcus, -Plus Transparant, Biatain, Silicone, -IBU, Physiotulle
Mesitran Soft Seasorb AG	Mesitran Soft, -Tulle, Biatain AG, Physiotulle AG
Seasorb Soft Mesitran Soft	Biatain, -Silicone, -IBU, Kliniderm Fiber, Mesitran Soft, -Net
Kliniderm Fiber Seasorb Soft Mesitran Soft, -Zalf	Biatain, -Silicone, -IBU, Kliniderm Fiber, Mesitran Hydro, -Tulle, -Soft, Comfeel Plus Ulcus, -Plus Transparant
Mesitran Soft Purilon	Mesitran Hydro, -Tulle, Biatain, -Silicone, -IBU, Comfeel Plus Ulcus, -Plus Transparant, Physiotulle
Necrotomie Mesitran Soft Seasorb Soft	Necrotomie Mesitran Zalf, -Net, Biatain, -Silicone, -IBU
Necrotomie Mesitran Zalf Seasorb Soft Kliniderm Fiber	Necrotomie Mesitran Zalf, Biatain, -Silicone, -IBU, Seasorb Soft, Kliniderm Fiber
Necrotomie Mesitran Soft, -Zalf Purilon	Necrotomie/droog verbinden Mesitran Soft, -Zalf, Purilon, Physiotulle
Necrotomie Mesitran Soft, -Zalf Seasorb AG	Necrotomie Mesitran Soft, -Zalf, Biatain AG, Physiotulle AG



## WONDWIJZER SPECIALE WONDBEDEKKERS

Omschrijving	REF	ZI-nr.
<b>Schuimverband standaard en adhesief</b>		
Biatain 5 x 7 cm	6105	15347095
Biatain 10 x 10 cm	3410	14216523
Biatain 15 x 15 cm	3413	14216531
Biatain 10 x 20 cm	3412	15028321
Biatain Adhesief 7,5 x 7,5 cm	3462	15347060
Biatain Adhesief 12,5 x 12,5 cm	3420	14216507
Biatain Adhesief 15 x 15 cm	3421	15347079
Biatain Adhesief Sacrum 23 x 23 cm	3485	14566087
Biatain Adhesief Hiel 19 x 20 cm	3488	14668599
Kliniderm Foam Hiel	174820	15547000
<b>Schuimverband met siliconen kleeflaag</b>		
Biatain Silicone border 7,5 x 7,5 cm	33434	15566943
Biatain Silicone border 10 x 10 cm	33435	15778517
Biatain Silicone border 12,5 x 12,5 cm	33436	15566951
Biatain Silicone border 17,5 x 17,5 cm	33438	15570673
Biatain Silicone Lite border 7,5 x 7,5 cm	33444	15778533
Biatain Silicone Lite border 10 x 10 cm	33445	15778541
Biatain Silicone Lite border 12,5 x 12,5 cm	33446	15778568
Biatain Silicone Ag border 7,5 x 7,5 cm	39636	15778575
Biatain Silicone Ag border 10 x 10 cm	39637	15778584
Biatain Silicone Ag border 12,5 x 12,5 cm	39638	15778592
<b>Schuimverband Ag (antibacterieel mbv zilver)</b>		
Biatain Ag 10 x 10 cm	39622	15359050
Biatain Ag Adhesief Sacrum 23 x 23 cm	39641	15359093
Biatain Ag Adhesief Hiel 19 x 20 cm	39643	15359085
<b>Honingverbanden (antibacterieel mbv honing)</b>		
Mesitran Hydro 10 x 10 cm (vochtige wonden)	174710	14924374
Mesitran Border 10 x 10 cm (vochtige wonden)	174711	14924390
Mesitran Net 10 x 10 cm (natte wonden)	174712	14924498
Mesitran Tulle 10 x 10 cm (droge tot natte wonden)	174715	15726967
Mesitran Soft wondgel 15 gram	174705	15048810
Mesitran wondzalf 20 gram	174701	14799391
<b>Alginaten</b>		
Seasorb Soft 5 x 5 cm	37052	14798220
Seasorb Soft 10 x 10 cm	37102	14798239
Seasorb Soft 15 x 15 cm	37152	14798247
Seasorb Soft Tamponstreng 44 cm	37402	14840871
<b>Alginaat Ag (antibacterieel mbv zilver)</b>		
Seasorb Ag 10 x 10 cm	3760	15245462
Seasorb Ag Tamponstreng 3 x 44 cm	3780	15245454
<b>Fiberverband (vertikale absorptie)</b>		
Kliniderm Fiber 5 x 5 cm	174520	15428214
Kliniderm Fiber 10 x 10 cm	174521	15428222
Kliniderm Fiber 15 x 15 cm	174522	15428230

## WONDWIJZER SPECIALE WONDBEDEKKERS



Omschrijving	REF	ZI-nr.
<b>Niet verklevend wondcontactmateriaal</b>		
Klinitulle vetgaas 10 x 10 cm	170098	14264617
Mesitran Tulle 10 x 10 cm (droge tot natte wonden)	174715	15726967
Physiotulle 10 x 10 cm	3910	15904342
Physiotulle Ag 10 x 10 cm	3926	15778495
<b>Hydrogel</b>		
Purilon gel 8 gram	3906	14566109
Purilon gel 15 gram	3900	14086980
Purilon gel 25 gram	3903	14086999
<b>Transparante wondfolies</b>		
Kliniderm Film 6 x 7 cm	4174402	14632071
Kliniderm Film 10 x 12 cm	4174403	14632098
Kliniderm Film 15 x 20 cm	4174404	14632101
Kliniderm Film 15 x 30 cm	4174405	14997568
<b>Transparante wondfolies (voor de gevoelige huid)</b>		
Kliniderm Film Xtrata 6 x 9 cm	291409	15102742
Kliniderm Film Xtrata 10 x 13,5 cm	291413	15102750
Kliniderm Film Xtrata 10 m x 5 cm (onsteriel)	291405	15102718
Kliniderm Film Xtrata 10 m x 10 cm (onsteriel)	291410	15102726
Kliniderm Film Xtrata 10 m x 15 cm (onsteriel)	291415	15102734
<b>Transparante wondfolie met wondkussen</b>		
Kliniderm Film Plus 5 x 7,2 cm	174410	15410854
Kliniderm Film Plus 10 x 10 cm	174412	15410870
Kliniderm Film Plus 10 x 15 cm	174414	15410889
<b>Hydrocolloïden</b>		
Comfeel Plus Ulcus 4 x 6 cm	3146	14019698
Comfeel Plus Ulcus 10 x 10 cm	4100	13924419
Comfeel Plus Ulcus 20 x 20 cm	3120	13924435
Comfeel Plus Ulcus 15 x 15 cm	3115	13924427
Comfeel Plus Transparant 5 x 7 cm	3530	13924354
Comfeel Plus Transparant 10 x 10 cm	3533	13924362
Comfeel Plus Transparant 15 x 15 cm	3539	13924389
Comfeel Plus Transparant 20 x 20 cm	3545	13924370
Comfeel Plus Contour 6 x 8 cm	3280	13924230
Comfeel Plus Contour 9 x 11 cm	3283	13924249
<b>Wondreining</b>		
Prontosan oplossing wondspoeling 40 ml	400412	15280837
Prontosan oplossing wondspoeling 350 ml	400403	15280845
Prontosan gel 30 ml	400505	15290883

Realiseer een wondprotocol online in slechts 3 maanden.  
Ga naar [www.wondprotocol.nl](http://www.wondprotocol.nl).


**Meer weten?**  
Kijk op [www.mediqmedeco.nl](http://www.mediqmedeco.nl) voor meer informatie.  
Of neem contact op met onze afdeling Customer Service  
(0186) 63 44 00, bereikbaar op werkdagen van 8.15 - 16.45 uur.

# RICHTLIJN AMBULANTE COMPRESSIE THERAPIE


## Het been volgend zwachtelen (volgens CBO)

Bij de hieronder beschreven zwachtelmethode wordt de vorm van het been gevolgd. De spierpomp wordt hierdoor optimaal ondersteund en insnoeringen voorkomen. Voorwaarde voor ambulante compressie therapie is dat de cliënt niet immobiel is. Vlak onder de knieschijf wordt met een circulaire toer van de zwachtels de neergaande toer van het verband opgehangen. De druk wordt op deze manier gelijkmatig over de kuit verdeeld. Toepassing alleen op indicatie van een arts.


## Vorbereiding: huidbescherming & polsteren

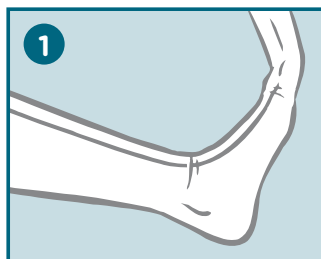


Breng als huidbescherming Tubifast buisverband aan over het onderbeen.

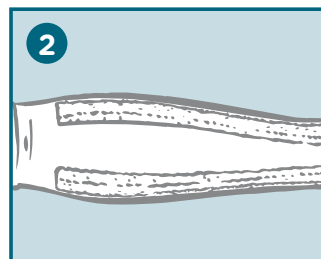

Plaats 2 stroken synthetische watten (op of onder de Tubifast) aan weerszijden van het uitstekende scheenbeen.

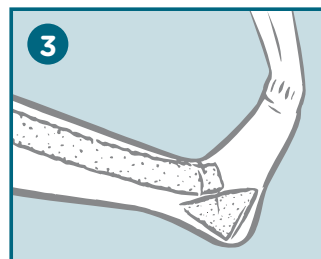

Plaats 2 gevouwen driehoekjes synthetische watten (op of onder de Tubifast) in de enkelcoullissen om deze op te vullen.

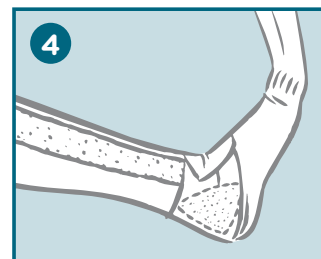

Zet de driehoekjes vast met een strook synthetische watten rondom de enkel. Dit beschermt zowel de achillespees als de voorvoet.

## Vorbereiding: Polsteren

**Stap 1** Begin met de eerste korterek zwachtel vanaf de grote teen en breng deze bovenlangs aan in de richting van de kleine teen (fig 1).

**Stap 2** Maak hierna eenmaal een toer over het midden van de voet waardoor de zwachtel wordt vastgezet (fig 2).

**Stap 3** Zwachtel vervolgens naar het midden van de hiel waarbij de slag voor 2/3 deel om de hiel en 1/3 om de hak wordt gewikkeld (fig 3).

**Stap 4** Zwachtel hierna met één toer het open gebleven gedeelte van de voet (fig 4).

**Stap 5** Breng vervolgens één circulaire toer horizontaal aan boven de enkel en laat nu de zwachtel de

vorm van het been volgen tot onder de knie (fig 5).

**Stap 6** Maak vlak onder de knieschijf één circulaire toer, laat vervolgens de zwachtel de vorm van het been naar beneden volgen en bedek de openingen (fig 6).

**Stap 7** Zwachtel vervolgens weer naar boven. Fixeer de zwachtel met twee stukken hechtpleister Kliniplast Textile (fig 7).

**Stap 8** Herhaal stap 1 t/m 7 met de tweede korterek zwachtel, echter nu t/m 12 in tegengestelde richting. Begin nu bij de kleine teen en zwachtel in de richting van de grote teen (fig 8 t/m 12).

## Leefregels

- Stimuleer de kuitspier middels beengymnastiek
- 's Nachts benen omhoog
- 's Middags benen half uur omhoog
- Indien mogelijk 1 uur per dag wandelen
- Warmte zo veel mogelijk vermijden
- Draag geen afknellende kleding, zoals bijv. panty-kousjes
- Zorg voor goede voeding en voldoende vochtinname
- Niet roken
- Verzorg de droge huid van voeten en benen met de huid pH neutrale producten uit de Klinion Personal Care huidverzorgingslijn
- Draag schoenen met platte zool om de voet goed af te wikkelen, dit stimuleert de bloedsomloop

## Benodigde materialen

Startset compressietherapie, bestelnr. 400132032  
Textelast Complete voor twee benen, bestelnr. 400132033  
Textelast Complete voor één been.

Meer informatie over vaatproblematiek en compressietherapie is te vinden op [www.klinion.nl](http://www.klinion.nl)

## Inhoud Textelast Complete

Voor 2 benen:

- 4 stuks Klinidur Textelast korterek zwachtel 5 m x 10 cm
- 2 stuks Tubifast 2way Stretch elastisch buisverband blauw 1 m
- 2 rollen Klinisoft SY synthetische polsterwatten
- 1 stuk Kliniplast Silk kunstzijde hechtpleister 5 m x 2,5 cm

Voor 1 been:

- 2 stuks Klinidur Textelast korterek zwachtel 5 m x 10 cm
- 1 stuk Tubifast 2way Stretch elastisch buisverband blauw 1 m
- 1 rol Klinisoft SY synthetische polsterwatten
- 1 stuk Kliniplast Silk kunstzijde hechtpleister 5 m x 2,5 cm

GRATIS toegevoegd:

- 1 protocol voor ambulante compressietherapie
- 1 meetlint

## Compressietherapie

Bestelnummer	Uitvoering	Afmeting	Inh. verpakking	ZI-memo-code	ZI-nummer
<b>Textelast Complete voor 2 benen</b>					
400132032			8 x 1 st		15906558
<b>Textelast Complete voor 1 been</b>					
400132033			18 x 1 st		15906531
<b>Klinidur Textelast - Korterek zwachtel</b>					
4132628		5 m x 8 cm	2 st	TEXTW5	14327821
4132630		5 m x 10 cm	2 st	TEXTW5	13755412
<b>Klinisoft SY - Synthetische watten (polstermateriaal)</b>					
4141091		3 m x 10 cm	1 st	SUNTW3	13651528
<b>Tubifast 2 Way stretch - Buisverband</b>					
9052438	Blauw 24-40 cm	10 m	1 st	TUBIX1	15383423
9052440	Geel 35-64 cm	10 m	1 st	TUBIX1	15383431

