

# KLINIÖN®

## Speciale Wondbedekkers



Het verband  
tussen klinion  
en speciale  
wondzorg



# Het verband tussen Klinion en speciale wondzorg

Iedere dag doen we bij Mediq Medeco ons uiterste best om zorgprofessionals te ondersteunen bij het bieden van de juiste zorg en zetten we ons in om de zorg betaalbaar te houden. De geavanceerde wondproducten van Klinion Kliniderm sluiten naadloos aan op deze visie. Deze producten onderscheiden zich namelijk door de combinatie van functionaliteit, comfort en scherpe prijsstelling.

Voor elke fase van de wondgenezing biedt Klinion wondbedekkers die voldoen aan de criteria voor geavanceerde wondzorg zoals een hoog draagcomfort, het bevorderen van de normale fysiologische wondgenezing, de ondoorlaatbaarheid voor micro-organismen, het absorberen van overmatig wondexsudaat, het creëren van vochtig wondmilieu en het beschermen van nieuw gevormd weefsel. Mocht u het product dat u zoekt niet kunnen vinden, neem dan contact met ons op.

## De productcategorieën van Klinion

- **Klinipress** Gaas- en nonwoven kompressen
- **Kliniderm** Speciale wondverbanden
- **Klinifix** Fixatiematerialen
- **Klinigrip** Steunproducten
- **Klinidur** Compressieproducten
- **Kliniplast** Pleisters
- **Klinisoft** Wattenproducten
- **Klinibond** Huidlijm
- **Klinisport** Sportverzorging

## De ondersteuning van Klinion

- **Klinion.nl** Meer kennis over wondzorg.
- **Wondprotocol.nl** Snel en eenvoudig online een protocol samenstellen.
- **Protocol op maat** Uw eigen wondprotocol opstellen en implementeren.
- **Educatie** Geaccrediteerde trainingen wondzorg op diverse niveaus.
- **E-learning** Geaccrediteerde e-learning wondzorg niveau 3 en niveau 4/5.
- **Informatielijn** Direct antwoord op uw vragen door verpleegkundig adviseurs.

Wilt u meer weten over onze merken of ondersteuning? Neem gerust contact met ons op via **Mediq Medeco, T (0186) 63 44 00, F (0186) 61 68 93, E [info@mediqmedeco.nl](mailto:info@mediqmedeco.nl)**



# Kliniderm foam silicone

Kliniderm foam silicone is een absorberend polyurethaan schuimverband met een zachte siliconen wondcontactlaag. Deze wondcontactlaag beschermt de omliggende huid en zorgt voor minder pijn bij verbandwisseling. De absorberende schuimlaag neemt wondvocht op en houdt het vast in het verband. Tevens verdampt wondvocht gedeeltelijk door het verband, waardoor de totale opnamecapaciteit vergroot wordt. Het siliconenverband ondersteunt een vochtige wondbehandeling en is ook te gebruiken onder compressie.

## Kenmerken

- Minder pijn bij verbandwisseling.
- Beschermt de omliggende huid.
- Eenvoudig (opnieuw) aan te brengen.
- Comfortabel voor de patiënt.
- Ondersteunt vochtige wondbehandeling.
- Patiënt kan douchen met het verband.
- Huidvriendelijke maar stevige fixatie.

## Indicaties

- Standaard voor matig tot hevig exsuderende wonden, lite voor licht exsuderende wonden.
- Veneuze en arteriële ulcera.
- Decubituswonden.
- Diabetische voetulcera.
- Postoperatieve wonden.
- Schaafwonden en andere traumatische wonden.

Kliniderm foam silicone mag ook op geïnfecteerde wonden worden toegepast mits de wondinfectie tegelijkertijd wordt behandeld volgens de daarvoor geldende richtlijnen.



## Kliniderm foam silicone

ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
15998541	40514823	5x5 cm	5	100
15998568	40514824	10x10 cm	5	100
15998576	40514825	15x15 cm	5	100
15998584	40514826	10x20 cm	5	100
15998592	40514827	20x20 cm	5	100

## Kliniderm foam silicone border

ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
15998606	40514828	7,5x7,5 cm	5	100
15998614	40514829	10x10 cm	5	100
15998622	40514830	12,5x12,5 cm	5	100
15998630	40514831	15x15 cm	5	100
15998649	40514832	10x20 cm	5	100
15998657	40514833	10x30 cm	5	100
15998665	40514834	15x20 cm	5	100

## Kliniderm foam silicone lite

ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
15998673	40514810	6x8,5 cm	5	100
15998681	40514811	10x10 cm	5	100
15998703	40514812	15x15 cm	5	100
15998711	40514813	20x50 cm	4	80

## Kliniderm foam silicone border lite

ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
15998738	40514814	4x5 cm	5	100
15998746	40514815	5x12,5 cm	5	100
15998754	40514816	7,5x7,5 cm	5	100
15998762	40514817	10x10 cm	5	100
15998770	40514818	15x15 cm	5	100

## Kliniderm heel en sacraal

ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
16116267	40514835	10x17,5 cm	5	100
16116240	40514837	22,5x22,5 cm	5	100
1611659	40514838	18x18 cm	5	100



# Kliniderm silicone wound contact layer


Kliniderm siliconen wondcontactlaag heeft een zachte poreuze structuur waar exsudaat eenvoudig doorheen kan naar het secundaire verband en waardoor de kans op maceratie vermindert. De siliconen wondcontactlaag zorgt voor een pijnloze verbandwissel, waardoor de wondgenezing niet wordt verstoord. Kliniderm wondcontactlaag heeft slechts aan één zijde een siliconenlaag. Het kompres is daardoor eenvoudig aan te brengen, ook met handschoenen aan.

## Kenmerken

- Ongestoorde wondgenezing en minimale pijn bij verbandwissel.
- Minimale kans op maceratie van de wondranden.
- Verband is transparant waardoor wondinspectie mogelijk is zonder het verband te verwijderen.
- Eenzijdige siliconenlaag verzekert eenvoudige applicatie en voorkomt verkleving aan het secundaire verband.
- Kosteneffectief.

## Indicaties

- Chronische exsuderende wonden zoals diabetische voetulcera, veneuze en arteriële ulcera, decubituswonden.
- 1<sup>e</sup>- en 2<sup>e</sup>-graads brandwonden.
- Chirurgische wonden.
- Traumatische wonden.
- Als bescherm laag bij negatieve druktherapie.
- Kan tot 7 dagen op de wond blijven.

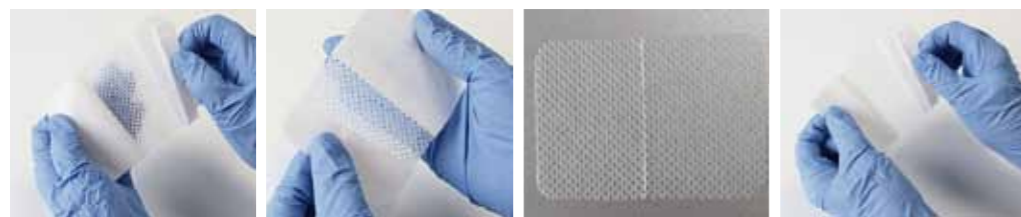

ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
16066243	40514880	5x7,5 cm	10	700
16066251	40514881	7,5x10 cm	10	400
16066278	40514882	10x18 cm	10	700
16066286	40514883	20x30 cm	5	150
16066294	40514884	17x25 cm	5	200

# Kliniderm foam

Kliniderm foam behoort tot de meest ontwikkelde generatie schuimverbanden en wordt ingezet bij diverse soorten matig tot sterk exsuderende wonden. Het absorberend schuimverband is één van de meest gebruikte speciale wondbedekkers met name vanwege het comfort en absorberend vermogen. Kliniderm foam kan tot 7 dagen op de wond blijven. Het is comfortabel en zacht voor de patiënt en absorbeert veel wondvocht zonder doorlekproblemen. Het creëert tevens een gunstig vochtig wondklimaat voor snelle wondgenezing. Kliniderm foam is leverbaar in een versie zonder kleefrand, een versie met kleefrand (border) en een hieluitvoering (heel).

## Kenmerken

- Sterk absorberend door directe opname in het foam.
- Speciale toplaag met een hoge waterdampdoorlaatbaarheid.
- In gebruik vormt het schuimverband zich naar het wondbed.
- Voorkomt maceratie.
- Verkleeft niet aan de wond.
- Huidvriendelijke microporeuze kleeflaag.
- Ondersteunt vochtige wondbehandeling.

## Indicaties

- Matig tot sterk exsuderende wonden.
- Veneuze en arteriële ulcera.
- Decubituswonden.
- Diabetische voetulcera.
- 1<sup>e</sup>- en 2<sup>e</sup>-graads brandwonden.
- Donorsites.
- Postoperatieve wonden.
- Schaafwonden en andere traumatische wonden.



## Kliniderm foam

ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
15546926	174810	5x5 cm	10	100
15546934	174811	10x10 cm	10	100
15546950	174812	15x15 cm	10	100
15546942	174813	10x18 cm	10	100
15546969	174814	20x20 cm	10	100

## Kliniderm foam border

ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
15546977	174815	7,5x7,5 cm (wondkussen 4x4 cm)	10	100
15546985	174816	10x10 cm (wondkussen 5x5 cm)	10	100
15546993	174817	15x15 cm (wondkussen 10x10 cm)	10	100
15547000	174820	heel	5	40
15819558	174822	18,5x18 cm	10	100

# Kliniderm fiber cmc

Kliniderm fiber carboxymethylcellulose (cmc) is een hydro-actief, sterk absorberend, zacht, gelvormend wondverband. Dankzij het sterke (verticale) absorptievermogen wordt wondvocht in het verband opgenomen en omgezet in gel. De omzetting zorgt voor een vochtige wondomgeving, wat het herstelproces en het autolytisch debridement bevordert. De sterke vezels van de Kliniderm fiber cmc zorgen ervoor dat het verband bij verbandwisseling in één stuk te verwijderen is uit de wond. Zonder beschadiging van het weefsel wordt bij verwijdering van het verband debris meegenomen. Het streven is immers een schoon wondbed te creëren. Er blijft geen residu achter in de wond.

## Kenmerken

- Stimuleert de wondgenezing door het creëren van een vochtig wondmilieu.
- Het sterke verticale absorberende vermogen reduceert het risico op maceratie van de wondranden.
- In één geheel uit de wond te verwijderen door sterke vezels.
- Kosteneffectief.

## Indicaties

- Chronische matig tot sterk exsuderende wonden zoals diabetische voetulcera, veneuze en arteriële ulcera, decubituswonden.
- Chirurgische wonden zoals postoperatieve wonden, secundair genezende wonden en donorsites.
- 2<sup>e</sup>-graads brandwonden.
- Traumatische wonden zoals schaaf- en snijwonden.
- Oncologische wonden.
- Diepe wonden zoals bijvoorbeeld fistels.



ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
16066308	40515020	5x5 cm	5	50
16066316	40515021	10x10 cm	5	50
16066324	40515022	4x30 cm	10	100
16066332	40515023	5x15 cm	5	50
16066340	40515024	1x45 cm	5	50
16066359	40515025	2x45 cm	5	50

# Kliniderm alginate

Kliniderm alginate is een sterk absorberend alginat wondverband van calcium- en natriumvezels. Het is geschikt voor gebruik bij wonden die veel wondvocht afgeven, met of zonder geel beslag, met of zonder necrose. In contact met wondvocht ontstaat een vormvaste gel die voor een vochtig wondmilieu zorgt en een optimale genezing bevordert. Het is ook geschikt voor gebruik bij geïnfecteerde wonden. Kliniderm alginate cavity is een dunne streng die ingezet wordt om diepe wonden op te vullen. Kliniderm alginate reinigt de wond door het absorberen van wondvocht en debris. Het verband dient altijd afgedekt te worden met een secundair verband.

## Kenmerken

- Resorbeerbaar verband van calcium- en natriumvezels.
- Sterk absorberend vermogen.
- Haemostatische (bloedstelpende) werking.
- Kan in zijn geheel verwijderd worden uit de wond.
- Verkleeft niet aan de wond waardoor pijn bij verbandwisselingen verminderd wordt en nieuw gevormd weefsel niet wordt beschadigd.

## Indicaties

- Hevig exsuderende chronische en acute wonden.
- Cavity voor opvulling van diepe wonden.
- Afhankelijk van de toestand van de wond kan Kliniderm alginate een aantal dagen op/in de wond blijven zitten.



ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
14632500	174501	5x5 cm	10	100
14632519	174502	10x10 cm	10	100
14632527	174503	10x20 cm	5	50
14632462	174515	30x2 cm Cavity	5	50



# Klinion mesitran wondzalf & wondgel

Mesitran antibacteriële wondzalf en wondgel op honingbasis kunnen ingezet worden in alle fasen van de WCS-wondclassificatie: zwarte, gele en rode fase. Mesitran is ook uitstekend preventief antibacterieel toepasbaar, zorgt voor een snelle weefselregeneratie en reduceert de vorming van littekenweefsel. Er zijn geen contra-indicaties en bijwerkingen bekend.

## Indicaties Mesitran wondzalf & wondgel

- Behandeling van chronische wonden zoals ulcus cruris en decubitus (graad I-V)
- Oncologische wonden.
- Acute wonden zoals schaaf- en snijwonden, ontvellingen en 1<sup>e</sup>- en 2<sup>e</sup>-graads brandwonden.
- Diverse schimmelinfecties zoals voet- en vaginale schimmels.

## Kenmerken alle Mesitran producten

- Antibacterieel (bactericide).
- Schimmeldodend (fungicide).
- Necrose-oplossend.
- Geurneutraliserend.
- Ontstekingsremmend.
- Creëert een vochtig wondmilieu.
- Optimaliseert de wondheling.
- Vermindert de kans op vorming van littekenweefsel.

## Samenstelling Mesitran zalf

- Bestaat uit gesteriliseerde honing (48%), medilan, calendula, aloë vera, zinkoxide en is verrijkt met vitamine A, C en E.

## Samenstelling Mesitran wondgel

- Bestaat uit gesteriliseerde zuivere honing (40%), glycolgelbasis, Medilan (non-allergeen), vitamine C en E (antioxidanten).

## Verschillen Mesitran wondzalf en wondgel

MESITRAN WONDZALF	MESITRAN WONDGEL
Compacte samenstelling	Dunner, gemakkelijker smeerbaar
Dun aanbrengen	Mag in grotere hoeveelheden aangebracht worden
Niet geschikt voor opvullen diepe wonden	Geschikt voor opvullen diepe wonden
Kan bij ruim aanbrengen prikkeling veroorzaken	Veroorzaakt geen prikkeling in de wond

ZI NR.	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	OVERDOOS
14799391	174701	Mesitran zalf tube à 20 gram	1	12
15048810	174705	Mesitran gel tube à 15 gram	1	12
15420094	174706	Mesitran gel tube à 50 gram	1	12



# Klinion mesitran wondverbanden

Klinion Mesitran wondverbanden zijn hydroactieve verbanden op honingbasis die geschikt zijn voor toepassing bij oppervlakkige acute of chronische wonden die licht tot matig vocht afgeven, met of zonder geel beslag, met of zonder necrose. Geschikt ook voor gebruik bij geïnfecteerde wonden; doodt onder andere de antibiotica-resistente bacteriën MRSA en VRE. Alle kenmerken van Mesitran (zie pagina 10) zijn ook van toepassing op de Mesitran verbanden.

## Kenmerken Mesitran hydro en hydro border

- Basis is een honing-gel (30% honing).
- Gel voorzien van semipermeabele wondfilm.
- Creëert optimaal vochtig wondklimaat.
- Hydro border variant is een eilandverband met klevende rand rondom.
- Waterdampdoorlatend en ondoorlaatbaar voor micro-organismen en vocht van buitenaf.
- Kleeft niet aan de wond.
- Transparant.
- Vermindert de kans op vorming van littekenweefsel.
- Afhankelijk van de toestand van de wond kan Mesitran hydro of hydro border 1 tot 5 dagen op de wond blijven.

## Kenmerken Mesitran net

- Synthetisch wondcontactmateriaal, voorzien van een honing-gel (30% honing).
- Wondvocht wordt gedeeltelijk opgenomen en overtollig vocht wordt doorgegeven aan het secundaire verband (absorberend verband of gaaskompres) dat op het netverband kan worden gelegd.
- Bij verbandwisseling kan het netverband (3-5 dagen) op de wond blijven en wordt tussentijds alleen het secundaire verband vernieuwd.
- Hecht niet aan de wond.
- Voor het behandelen van grote wonden kunnen meerdere netverbanden aansluitend worden aangebracht.
- Vooral geschikt voor vochtige tot natte wonden.

## Kenmerken Mesitran tulle

- Hydro-actief polyetheen wondcontactmateriaal met Mesitran soft (40% honing).
- Verkleeft niet aan de wond.
- Mag over de wondranden gelegd worden.
- Meest geschikt voor oppervlakkige wonden die geen tot matig vocht afgeven.
- Afdekken met kompres of absorberend verband en vastzetten met brede fixatiepleister of (cohesief) windsel.
- Vervang het verband binnen 3-5 dagen.

ZI NR.	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	OVERDOOS
14924374	174710	Mesitran hydro 10x10 cm	5	100
14924390	174711	Mesitran border 10x10 cm	5	100
14924498	174712	Mesitran net 10x10 cm	5	100
15726967	174715	Mesitran tulle 10x10 cm	10	240



# Kliniderm hydro

Een steriel hydro-actief wondverband voor de behandeling van chronische en acute wonden, die weinig tot matig wondvocht afgeven. Kliniderm hydro verkleeft niet aan de wond, waardoor pijn bij verbandwisselingen verminderd wordt en nieuw gevormd weefsel niet wordt beschadigd. In contact met wondvocht vormt het verband een gel. Het houdt een vochtig wondmilieu in stand, dat het fysiologische genezingsproces van de wond stimuleert.

## Kenmerken

- Steriel hydro-actief wondverband.
- Creëert een vochtig wondmilieu.
- Vervaardigd van een polymeer matrix.
- Voorzien van een semipermeabele polyurethaan foam/folie toplaag.
- Ondoorlaatbaar voor water en bacteriën.
- Kan meerdere dagen op de wond blijven zitten.

## Indicaties

- Chronische en acute wonden, die weinig tot matig wondvocht afgeven.
- Brandwonden.
- Schaafwonden.
- Donorsites.
- Decubituswonden.
- Ulcus cruris.
- Postoperatieve wonden.

## Kliniderm hydro is leverbaar in diverse uitvoeringen

- **Kliniderm hydro thin** Zeer dun, transparant, hydro-actief wondverband voor wonden die weinig vocht afgeven.
- **Kliniderm standard** Geschikt voor wonden die matig vocht afgeven.
- **Kliniderm border** Standaard hydrocolloïd met extra fixatierand.
- **Kliniderm border sacraal** Standaard hydrocolloïd met extra fixatierand in sacraalvorm voor de stuit.



ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
14632241	174101	Thin 7,5x7,5 cm	5	300
14632306	174102	Thin 10x10 cm	5	300
14632322	174103	Thin 15x15 cm	5	150
14632349	174104	Thin 20x20 cm	5	100
14632373	174302	Standard 10x10 cm	5	100
14632403	174303	Standard 15x15 cm	5	50
14632411	174304	Standard 20x20 cm	5	50
14632128	174201	Border 7x7 cm	5	100
14632187	174202	Border 10x10 cm	5	100
14632195	174203	Border 14x14 cm	5	50
14642816	174204	Border Sacraal 15x18 cm	5	50

# Kliniderm hydrogel

Kliniderm hydrogel wordt ingezet bij diverse chronische wonden met necrose en/of fibrinebeslag of bij wonden waar een vochtige wondbehandeling gewenst is. Een hydrogel creëert een vochtig wondmilieu, hydrateert de wond en het houdt vocht vast. Dit is van belang voor een snelle en efficiënte wondgenezing. Daarnaast stimuleert Kliniderm hydrogel het autolytisch debridement en wordt het ingezet om zwarte necrose te verweken of geel fibrinebeslag op te lossen. In de rode 'fase' wordt een hydrogel toegepast om kwetsbaar granulatiweefsel te beschermen. Bij diepe wonden vult een hydrogel de 'dode' ruimtes op; dit is van belang om infectie te voorkomen. Omdat Kliniderm hydrogel voornamelijk uit water bestaat, heeft het bovendien een verkoelend en pijnverzachend effect.

## Kenmerken

- Transparante hydrogel van 85% water.
- Gel blijft goed op zijn plaats door zijn compacte structuur.
- Bevordert zelfreinigend vermogen van de wond.
- Creëert een vochtig wondmilieu.
- Beschermt en koelt de wond en verzacht bij wondpijn.



ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
15901114	40511000	tube à 8 gram	10	100
15901122	40511002	tube à 15 gram	10	100
15901130	40511004	tube à 25 gram	10	100

# Klinibond huidlijm

Klinibond huidlijm is geschikt voor het sluiten van schone, acute (snij)wonden. Het aanbrengen van Klinibond is pijnloos, snel en gemakkelijk. Pijnbestrijding is niet nodig. Klinibond is in één laag aan te brengen en goed te doseren. Het afdekken van de wond is niet noodzakelijk. De patiënt mag zich na behandeling kort wassen of douchen. Voordeel van deze behandeling is dat achteraf geen hechtingen hoeven te worden verwijderd. Bovendien geeft wondsluiting met Klinibond huidlijm een betrouwbare wondsluiting met een mooi cosmetisch resultaat.

## Kenmerken

- Transparante huidlijm op basis van n-butyl-cyanoacrylaat.
- Geleverd in een kunststof ampul.
- Voorzien van unieke en handige applicator voor een zeer nauwkeurige applicatie.
- Bewaren in koelkast.



ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
14742659	115500	0,5 gram met applicator	10	100

# Kliniderm superabsorbent dressing

Kliniderm superabsorberend verband wordt ingezet bij hevig exsuderende wonden. Kliniderm superabsorberend verband bestaat uit een zachte nonwoven wondcontactlaag die het wondvocht direct doorlaat naar de onderliggende absorberende kern. Deze absorberende kern bestaat uit superabsorberende polymeren (SAP). Deze nemen zeer veel wondvocht en bloed op en houden het vast zodat de wond en ook de omliggende wondranden niet te nat worden en er maceratie kan ontstaan. De gevormde gel in de absorberende kern zorgt voor een vochtig wondmilieu waardoor het verband niet verkleeft aan de wond. De buitenzijde van het verband bestaat uit een blauwe, hydrofobe laag. Deze minimaliseert het risico op lekkage. De absorberende kern zit los in het kompres zodat deze vrij kan opzwellen en dus veel wondvocht kan opnemen. Kliniderm superabsorberend verband kan prima onder compressie worden toegepast.

## Kenmerken

- Verband absorbeert ongeveer 30x het eigen gewicht in wondvocht.
- De witte kant van het verband is de wondcontactlaag.
- De absorberende kern bestaat uit superabsorberende polymeren (SAP).



## Kliniderm superabsorbent dressing steriel

ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
15937895	40511700	7,5x7,5 cm	50	400
16066421	40511706	10x10 cm	10	50
15937909	40511701	10x10 cm	50	400
16066448	40511707	10x15 cm	10	40
15937917	40511702	10x20 cm	50	400
16066456	40511708	15x20 cm	10	40
15937925	40511703	20x20 cm	15	120
16066464	40511709	20x25 cm	10	40
15937933	40511704	20x30 cm	10	80

## Kliniderm superabsorbent dressing niet steriel

ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
15937941	40511710	10x10 cm	100	600
15937968	40511711	10x20 cm	50	300
15937976	40511712	20x20 cm	50	150



# Kliniderm film

De steriele Kliniderm film transparante wondfolie is met name geschikt voor de behandeling van 1<sup>e</sup>-graads brandwonden, donorsites, drukplekken of de preventie ervan, postoperatieve wonden en schaafwonden. Daarnaast wordt de Kliniderm film toegepast voor de fixatie van infusen en als secundair wondverband. Het houdt het vochtig wondmilieu in stand en heeft daardoor een gunstig effect op het natuurlijke genezingsproces. Door de transparante folie kan het genezingsproces goed worden gevolgd. Kliniderm film is tevens leverbaar in een onsteriele film op rol voor de secundaire afdekking van wondverbanden. Kliniderm film IV is een transparante fixatiepleister speciaal voor een fixatie van infusen en centrale lijnen. Door de transparante wondfolie is de insteekopening altijd goed zichtbaar.

## Kenmerken

- Steriel transparant polyurethaan wondfolie.
- Voorzien van een huidvriendelijke polyacrylaat kleeflaag.
- Semipermeabel voor gelijkmatige uitwisseling van waterdamp en zuurstof.
- Ondoorlaatbaar voor micro-organismen.
- Met de wondfolie kan kortdurend gedoucht worden.
- Kan 3-7 dagen op de wond blijven zitten.
- Gebruiksvriendelijke applicatietechniek in 3 stappen.

## Kliniderm film steriel

ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
14632071	174402	6x7 cm	10	450
14632098	174403	10x12 cm	10	280
14632101	174404	15x20 cm	10	140
14997568	174405	15x30 cm	10	70



## Kliniderm film roll onsteriel op rol

ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
16066472	40514870	5 cm x10 m	1	50
16066480	40514871	10 cm x10 m	1	20
16066499	40514872	15 cm x10 m	1	20



## Kliniderm film IV infuuspleister

ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
	40514855	6x7 cm	50	600
15410927	4174420	8x5,5 cm	50	2400



## Kliniderm film with pad met wondkussen

ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
15982998	40514860	5x7,2 cm	50	600
15986233	40514861	10x10 cm	50	600
15986241	40514862	10x12 cm	50	600
15986268	40514863	10x15 cm	50	600
15986276	40514864	10x20 cm	50	300
15986284	40514865	10x25 cm	50	300
15986292	40514866	10x30 cm	50	300
16066502	40514867	10x35 cm	50	300
15986306	40514868	15x20 cm	50	300
	40514869	20x30 cm	50	300



## Kliniderm film steriel bulkverpakking\*

Kliniderm film is in iets andere uitvoering ook leverbaar in bulkverpakking voor gebruik in met name ziekenhuizen en instellingen. Deze uitvoering heeft een applicatiemethode in 2 stappen en heeft door de grootverpakking een scherpere prijsstelling.

REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
40514840	4x5 cm	50	600
40514841	5x7,2 cm	50	600
40514842	10x10 cm	50	600
40514843	10x12 cm	50	600
40514844	10x15 cm	50	600
40514845	10x20 cm	50	300
40514846	10x25 cm	50	300
40514847	10x30 cm	50	300
40514848	15x20 cm	50	300
40514849	20x30 cm	50	300



\*bulkverpakking met 2-staps applicatiemethode

# Kliniderm film xtrata

Kliniderm xtrata met Stratagel™ kleeflaag is een extra huidvriendelijke wond- en fixatiefolie die speciaal geschikt is voor gebruik bij de probleemhuid en de tere huid van bijvoorbeeld ouderen, kinderen, dialyse- en oncologiepatiënten. Door de huidvriendelijke eigenschappen is deze wond- of fixatiefolie is zeer geschikt om gedurende langere tijd te gebruiken. Kliniderm film xtrata steriele transparante wondfolie wordt gebruikt voor het afdekken van weinig vocht afgevendene schone wonden. Ook toepasbaar voor het fixeren van diverse wondkassen en voor het fixeren van infusen en centrale lijnen. Kliniderm film xtrata niet-steriele transparante fixatiefolie op rol is zeer geschikt voor waterdichte fixatie van diverse kassen en het fixeren van diverse lijnen.

## Kenmerken

- Uitstekende kleefkracht omdat de Stratagel™ kleeflaag zich optimaal verspreidt over het ruwe oppervlak van de huid waardoor het contactoppervlak met de huid vergroot wordt en een minder sterke kleefkracht nodig is om toch stevig te fixeren.
- De huid wordt bij het verwijderen van de folie niet of nauwelijks beschadigd.
- Kleefkracht is direct optimaal in tegenstelling tot polyacrylaat kleeflagen.
- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid (MVTR 2000 g/m<sup>2</sup>/24h).
- Volledig ondoorlaatbaar voor bacteriën van buitenaf.
- Waterdicht voor vocht van buitenaf (wassen en douchen mogelijk).
- Folie is flexibel waardoor geschikt voor toepassing op gewrichten.



## Kliniderm film xtrata steriel

ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
15102742	291409	6x9 cm	100	500
15102750	291413	10x13,5 cm	50	300

## Kliniderm film xtrata onsteriel op rol

ZI NR.	REFERENTIE	MAAT	VERPAKKING	OVERDOOS
15102718	291405	5 cm x10 m	1	20
15102726	291410	10 cm x10 m	1	20
15102734	291415	15 cm x10 m	1	20




## Het voordeel van xtrata

De flexibele gepatenteerde Stratagel™ kleeflaag vormt zich volledig naar het ruwe oppervlak van de huid. Dit zorgt voor een stevige kleefkracht terwijl de schade aan het stratum corneum bij het verwijderen van de pleister drastisch wordt teruggebracht. De vloeibaarheid van de lipogel kleeflaag en de enorme vochtdoorlaatbaarheid resulteren in een unieke en zeer huidvriendelijke kleeflaag.

### Xtrata


#### Zeer geringe beschadiging stratum corneum

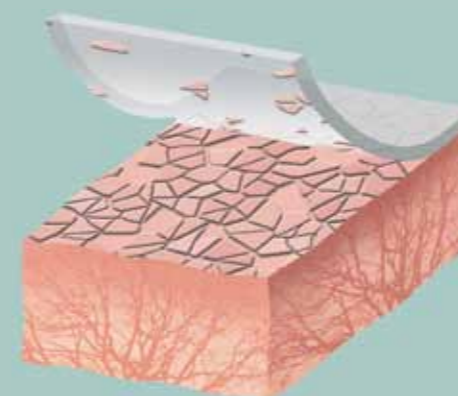

20% van stratum corneum verwijderd


### Traditionele kleeflaag

#### Substantiële huidbeschadiging door verwijdering stratum corneum

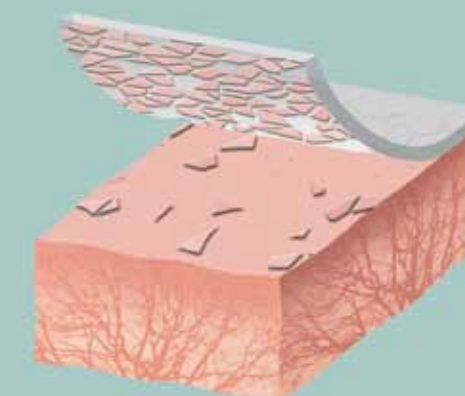

89% van stratum corneum verwijderd

De buitenste laag van de huid, de stratum corneum, heeft een belangrijke barrièrefunctie. Beschadiging van deze laag door het gebruik van pleisters maakt de huid gevoelig voor het ontstaan van irritatie en diverse huidklachten.

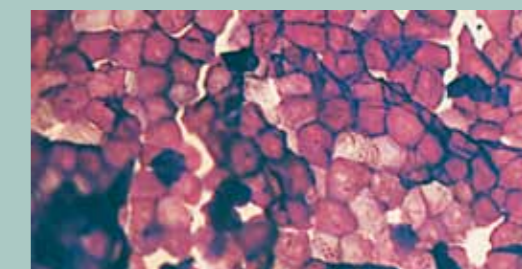

Microscopische opname van het kleefoppervlak van de pleister na verwijdering.  
Toepassingsgebied: borst.  
Duur van applicatie: 6 uur (vergroting: x50).

# KLINION beslisboom wondverzorging

**d** Diepe wond   **o** Oppervlakkige wond



## ROOD, WONDSPOELING

doel = beschermen




## GEEL, WONDSPOELING

doel = reinigen  
bacteriën verwijderen



## ZWART, WONDSPOELING

doel = reinigen,  
necrose, bacteriën  
verwijderen. Bij droge  
necrose niet spoelen.

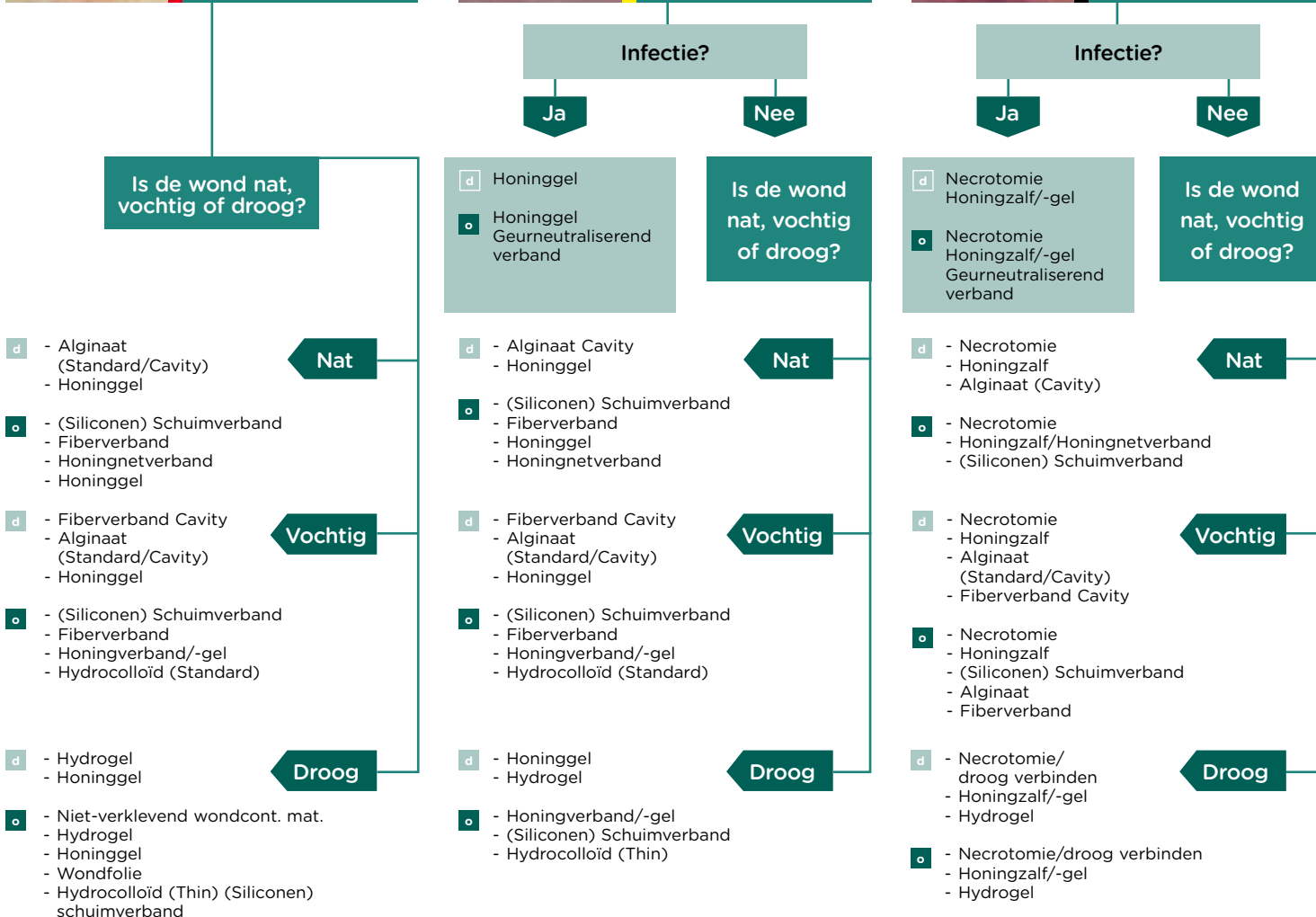

## Classificatie en wondbehandeling

### • Rode fase

Beschermen van de wond en absorberen wondvocht en creëren vochtig wondmilieu.

### • Gele fase

Reinigen, antibacterieel beleid, absorberen wondvocht en creëren vochtig wondmilieu.

### • Zwarte fase

Necrose verwijderen, reinigen, antibacterieel beleid en absorberen wondvocht.

## Indicaties speciale wondbedekkers

### • Chronische wonden

Bijvoorbeeld Decubitus (graad I-V), Ulcus Cruris, diabetische ulcera, oncologische wonden.

### • Acute wonden

Bijvoorbeeld schaafwonden, snijwonden, ontvellingen, 1<sup>e</sup>-, 2<sup>e</sup>-graads brandwonden en postoperatieve wonden.

### • Schimmels

Voor de behandeling van bacteriële en schimmelinfecties (voet-nagel) wordt Mesitran zalf aanbevolen.

### • Geïnfecteerde wonden

Wonden met bacteriën, zoals E-coli, MRSA, stafylokokken en pseudomonas.

## Is er een infectie?

Een gecontamineerde wond is het voorstadium van infectie. Behandel wonden met een verhoogd infectierisico (bijv. ulcera, decubitus en brandwonden) preventief met een antibacterieel product. Geïnfecteerde wonden moeten gereinigd en antibacterieel worden behandeld om genezing mogelijk te maken. De belangrijkste wondbacteriën zijn stafylokokken en pseudomonas. Voorkom dat contaminatie een infectie wordt.

Wilt u meer weten over het gebruik van de Klinion producten of een deskundig advies? Kijk dan op [www.mediqmedeco.nl](http://www.mediqmedeco.nl) of [www.klinion.nl](http://www.klinion.nl) voor meer informatie. Of neem contact op met onze afdeling Customer Service (0186) 63 44 00, bereikbaar op werkdagen van 8.15 - 16.45 uur. **Wij zijn er voor u!**